

# INTUITION CLICK™

[www.cdrsyst.ca](http://www.cdrsyst.ca)

403.850.7035

[info@cdrsyst.ca](mailto:info@cdrsyst.ca)

1.855.856.7035

## INTUITION IMMOBILISATION DE PRECISION DU CRANE, RACHIS CERVICAL ET EPAULES

### APERCU DU PRODUIT

L'Intuition Frame™ permet un positionnement personnalisé d'une tolérance extrêmement faible pour le crâne, le rachis cervical et les épaules. Ce système maintient l'alignement et la courbe du cou, et positionne et rétracte les épaules, tout en permettant une précision au millimètre près de tous les axes y compris la rotation angulaire de la tête et du cou. Tous les avantages de la précision sans compromettre le confort du patient.





Mitsubishi Heavy Industry MHI TM2000 Vero LINAC



**MM14**  
Intuition Frame



Moule Intuition achevé,  
dans Intuition Frame™



Masque Hybride, Shoulder  
Tech avec moule Intuition



Masque complet avec moule  
Intuition



**MM03**  
MayoMold™ ouverture  
standard

**MM03-W**  
MayoMold™ grande ouver-  
ture pour patients plus forts

## CARACTERISTIQUES

**Temps d'installation initiale :** 8 à 15 minutes

**Temps d'installation lors du traitement :** Instantané

**Processus :** InstaForm se coule dans l'Intuition Frame. Le patient s'allonge dedans et le cadre est réglé pour optimiser la position du patient. InstaForm réagit en remplissant tous les vides et crée une pression contre l'anatomie du patient jusqu'au plan coronal. A base d'eau, InstaForm durcit pour former un support parfaitement rigide.

**Equipement requis :** Plateforme d'immobilisation CDR Freedom

**Confort :** La personnalisation permet le confort grâce à une surface de contact maximisée avec le patient

**Masque de contention :** Optimisé pour utilisation avec des masques de contention CDR et des options Shoulder Tech. Démonstré comme solution SRT sans masque, cf Practical Radiation Oncology (2012) 2, 54-62



**IFF03**  
Taille standard (4 kits/boite)

**IFF03-B**  
Grande taille (4 kits/boite)